

1. Comprobación

Colócate las gafas de fotoprotección y el resto de EPI.

1

Conecta el cargador a la base y enchúfalo.

2

Descuelga la lámpara de su base como se ve en el vídeo.

3

Retira el capuchón de la lámpara.

4

Presiona el botón M para encender equipo.

5

Volver a presionar el botón M para seleccionar el modo de trabajo: potencia máxima, escalonada o por pulsos.

6

El modo potencia máxima, irradia de forma intensa desde el inicio.

7

El modo escalonada, irradia de forma progresivo al inicio y al final.

8

El modo por pulsos, irradia de forma intermitente.

9

Posicionar la fibra óptica cerca de la pieza dental y activar el botón P. Al presionar el botón P oirán un sonido "bip". La...

10

Se oirá un pitido cuando la cuenta regresiva llegue a 0 el trabajo finalizará. Durante el funcionamiento se puede detener el...

11

Finalizado el trabajo, se debe desmontar el equipo para su higienización, según se muestra en el vídeo. La fibra óptica que has...

12

Cuelga la lámpara en su base y comprueba que queda cargando. Una vez esterilizada la fibra, colócala en la lámpara con el...

13

¡Correcto!



¡Enhorabuena! Ha completado la guía correctamente.

14